

FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

GEL DE CONTATO

Premium Gel

ULTRA-SONOGRAFIA



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

GEL DE CONTATO PREMIUM GEL
ULTRASSONOGRAFIA

Registro N.º: 80329380001

Apresentações do produto:

Volumes:	Código EAN:
1Kg	7898920384 28 6
5Kg	7898920384 27 9

GEL DE CONTATO PREMIUM GEL ULTRASSONOGRAFIA

PREMIUM GEL é um meio de contato para transmissão Ultrassônica.
Produto Solúvel em água, Incolor e não Gorduroso, facilitando sua remoção através de papel ou tecido absorvente.
pH Neutro. Não contém álcool em sua formulação.

INDICAÇÃO

Indicado como meio de contato para uso em exames de Ultrassonografia. Uso externo.

MODO DE USAR

- Aplicar e espalhar o Gel na região de contato, formando uma camada,
- Realizar o procedimento. Seguir sempre as orientações de acordo com as instruções do fabricante do equipamento em uso.
- Para limpar o resíduo do Gel, utilizar sempre papel toalha absorvente descartável.
- Produto de uso único.

COMPOSIÇÃO

Polímero Carboxivinílico, Aminometilpropanol, EDTA, Metilparabeno, Propilparabeno, Água Desmineralizada.

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto após o término da validade.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco, ao abrigo da luz e calor. Conservar a embalagem fechada após o uso.

FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01
Tel 62 3094 3850 sac@reymer.com.br www.reymer.com.br
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035
A.F.E.: UP11604756X2

REYMER[®]
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.