

FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

GEL DE CONTATO

Premium Gel

ECG



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto:

GEL DE CONTATO PREMIUM GEL
ECG

Resgistro N.º: 80329380001

Apresentações do produto:

Volumes:

1Kg
5Kg

Código EAN:

7898920384 36 1
7898920384 35 4

GEL DE CONTATO PREMIUM GEL ECG

PREMIUM GEL é um meio de contato para exames de eletrocardiograma. Produto Solúvel em água e não Gorduroso, facilitando sua remoção através de papel ou tecido absorvente. pH Neutro. Não contém álcool em sua formulação.

INDICAÇÃO

Indicado como meio de contato entre o eletrodo e a pele do paciente a ser monitorado. Uso externo.

MODO DE USAR

- Aplicar e espalhar o Gel em quantidade suficiente.
- Realizar o procedimento. Seguir sempre as orientações de acordo com as instruções do fabricante do equipamento em uso.
- Para limpar o resíduo do Gel, utilizar sempre papel toalha absorvente descartável.
- Produto de uso único.

COMPOSIÇÃO

Polímero Carboxivinílico, Aminometilpropanol, EDTA, Metilparabeno, Propilparabeno, Água Desmineralizada.

PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto após o término da validade.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco, ao abrigo da luz e calor. Conservar a embalagem fechada após o uso.

FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01
Tel 62 3094 3850 sac@reymmer.com.br www.reymmer.com.br
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035
A.F.E.: UP11604756X2

REYMER[®]
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.