

# FICHA DE INFORMAÇÕES E DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

GEL DE CONTATO

# Premium Gel

FISIOTERAPIA



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

### Nome do Produto:

GEL DE CONTATO PREMIUM GEL  
FISIOTERAPIA

Resgistro N.º: 80329380001

### Apresentações do produto:

#### Volumes:

1Kg  
5Kg

#### Código EAN:

7898920384 32 3  
7898920384 31 6

## GEL DE CONTATO PREMIUM GEL FISIOTERAPIA

PREMIUM GEL é um meio de contato para fisioterapia.

Produto Solúvel em água e não Gorduroso, facilitando sua remoção através de papel ou tecido absorvente.

pH Neutro. Não contém álcool em sua formulação.

## INDICAÇÃO

Indicado como meio de contato para uso em aparelhos de ultrassonografia e para massagens de fisioterapia. Uso externo  
Produto de uso único.

## MODO DE USAR

### - Para uso em ultrassom:

Colocar quantidade suficiente do Gel na região de contato, formando uma camada. Realizar o procedimento. Para limpar o resíduo do Gel utilizar papel toalha absorvente descartável.

### - Para Massagens:

Colocar quantidade suficiente para facilitar a massagem. Para limpar o resíduo do gel utilizar papel toalha absorvente descartável.

## COMPOSIÇÃO

Polímero Carboxivinílico, Aminometilpropanol, EDTA, Metilparabeno, Propilparabeno, Água Desmineralizada.

## PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar o produto após o término da validade.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco, ao abrigo da luz e calor. Conservar a embalagem fechada após o uso.

## FABRICADO POR

REYMER DO BRASIL - Indústria e Comércio Prod. Quim. Ltda.  
Rua São Francisco QD 02 Lt 20 CEP.: 74980-110  
Aparecida de Goiânia CNPJ: 00.075.112/0001-01  
Tel 62 3094 3850 sac@reymmer.com.br www.reymmer.com.br  
Responsável Técnico: Silviane Borges Camargo - CRF-GO 2035  
A.F.E.: UP11604756X2

**REYMER**<sup>®</sup>  
Prevenção e Higiene em 1º Lugar.